


Kurzanleitung*

Sitzstabilisierung bei der Frühmobilisation

HINWEIS: NICHT FÜR DEN PATIENTENTRANSPORT GEEIGNET!


Mobilisierungsprozess mit zwei Personen durchführen - empfohlen
 Bei der Verwendung von Stabilisierungsgurten muss immer das T-Element verwendet werden
 Mobilisation erst nach Arztanordnung

Schritt 1: Öffnen der Armausleger




Schritt 2: Manuelles Anfahren des Systems an den Patienten

Schritt 3: Bremse betätigen



Schritt 4: Per **Handschalter** und/oder **Säulentastatur**:

- motorisches Anfahren des Rückenteils an den Patienten (Feineinstellung)
- motorische Höhenverstellung

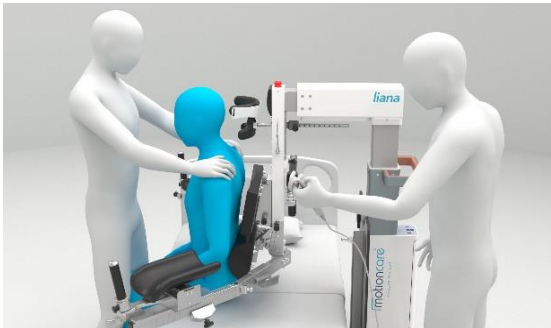

Schritt 5: Einstellung der **Lendenstütze** / **Rückenlehne** / **Kopfschale**



*Bei dieser Anleitung handelt es sich um eine Kurzanleitung, welche in keiner Weise die Bedienungsanleitung ersetzt.

Kurzanleitung*


Sitzstabilisierung bei der Frühmobilisation

HINWEIS: NICHT FÜR DEN PATIENTENTRANSPORT GEEIGNET!

Mobilisierungsprozess mit zwei Personen durchführen - empfohlen
Bei der Verwendung von Stabilisierungsgurten muss immer das T-Element verwendet werden
Mobilisation erst nach Arztanordnung

Schritt 6: **Überprüfung** der stabilen Sitzposition

Schritt 7: Einstellung der **Armlänge / Armbreite**

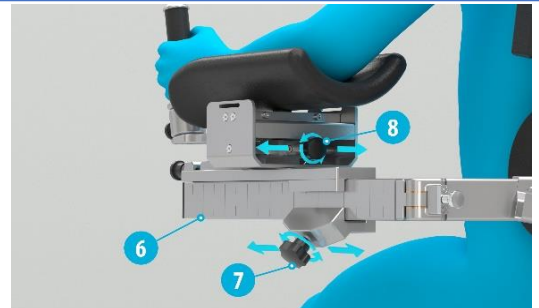

Schritt 8: Anlage der **Stabilisierungsgurte**



Schritt 9: Einsetzen des Rausfall- schutzes (**T-Element**)




OPTIONAL

Schritt 10: Anbringung des **Tisches**



Schritt 11: Betätigung des Sicherheits- schalters: **Strom aus**

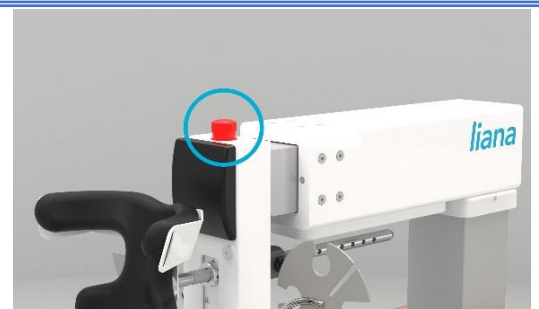

*Bei dieser Anleitung handelt es sich um eine Kurzanleitung, welche in keinsten Weise die Bedienungsanleitung ersetzt.